

待合室や撮影室でシリンジ（輸液）ポンプが
「ピー・ピー」と鳴ったら？


⇒何の警報？か確認する！

【主な原因】

- バッテリー不足（電圧低下）
- 気泡（輸液ポンプのみ）
- 閉塞
- 流量異常（設定間違い、シリンジのセット不良）
- 液切れ（輸液が残っていない）
（センサーの汚れ、位置不良）
- ドアオープン（輸液セットが正しくセット
されていない。ドアが閉まっていない）

バッテリー不足時の対応

1. コンセントに接続する。
2. 「停止・消音SW」を押す。※二度押すと送液が停止する。
3. 動作表示が回転点灯していること確認する。

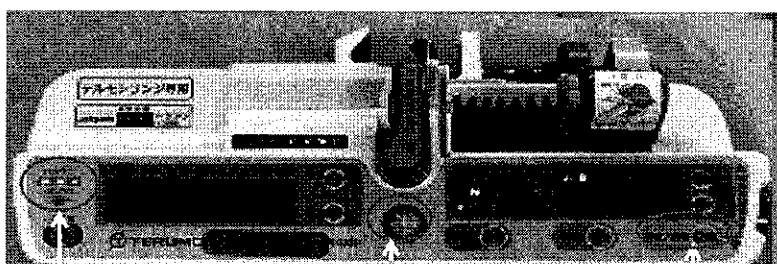

バッテリー残量 動作表示 停止・消音SW

⇒バッテリーでの駆動は移動の間のつなぎと考え、
原則はコンセントを使用する